

## Transport des échantillons biologiques dans une pochette réfrigérée



- Conserver la pochette au réfrigérateur à +4°C au moins 12h avant utilisation.  
**NE PAS CONGELER LES POCHETTES**



- Mettre le ou les tubes dans un gant et faire un nœud (ne pas les mettre directement dans la pochette).



- Insérer le gant dans la pochette réfrigérée et la fermer par le Velcro.



- Insérer la pochette réfrigérée dans une pochette de transport utilisée habituellement pour le transport des échantillons biologiques.



- Enlever la bande autocollante pour rendre étanche la pochette de transport.



- Mettre la fiche de demande d'examens du laboratoire dans la poche transparente de la pochette de transport

- Acheminer la pochette vers le laboratoire dans les plus brefs délais.